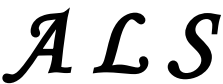


Gebrauchsanweisung	Hilfsmittel-Nr.	Seite 1 von 2 Seiten	 Alternative Lagerungs Systeme
Anti-Dekubitus- Lagerungsauflage Art: rosa, gelb & rosa+gelb"	11.11.03.4xxx		
	erstellt: 17.11.04 von: H.-J. Riechel	aktueller Stand: 10.03.2005	

Bei unserm Schaumstoff handelt es sich um einen High-Tech-Schaumstoff (SAF-Schaum 60120 + 6060), wie er im „Expertenstandard Dekubitus-Prophylaxe in der Pflege“ erwähnt wird, und der über die dort geforderten Anforderungen hinaus geht.

Die **A L S - Lagerungsauflagen** werden immer auf die im Bett befindliche Matratze gelegt. Zwischen Matratze und der **A L S - Lagerungsauflage** kann unter Umständen ein Nässeschutz gelegt werden. Auf keinen Fall darf über die **A L S - Lagerungsauflage** ein Nässeschutz gelegt werden, weil sonst der Wirkungsgrad des **SAF - Spezialschaumstoffes** erheblich vermindert wird.

Über die Lagerungsauflage wird ein Laken (*Spannbettlaken oder anderes*) **gelegt**. Unter Umständen kann im Bereich des Gesäßes ein dünner Nässeschutz gelegt werden, wenn der Patient stark inkontinent ist (Ausnahme).

*Die Lagerungsauflage ist **im häuslichen Bereich** in jeder Waschmaschine waschbar, kann geschleudert und anschließend in jedem handelsüblichen Wäschetrockner getrocknet werden.*

Wichtig:

Es darf auf keinen Fall ein Weichspülmittel verwendet werden bzw. Waschmittel, in dem ein Weichspüler enthalten ist. Wird ein Weichspülmittel verwendet, wird der Spezial-Schaumstoff nicht mehr fest und bleibt weich.

Der Patient darf auf keinen Fall direkt auf den Schaumstoff gelegt werden, weil sonst die Haut austrocknet.

Gewicht in kg (ca.)	Spezial-Schaumstoff	Aufbau
500 gr. – 50 kg:	gelb einfach	Gelbe Auflage auf die Matratze, darüber ein Laken legen.
Indikationen: Pergamenthaut, Wassereinlagerungen, Fröhchen, Kinder, CA-Patienten mit starkem Gewichtsverlust, Probleme im Bereich des Wärmehaushaltes des Körpers, Schmerzpatienten , sowie bei Krankheitsbildern wie unter 50-kg – 85 kg aufgeführt		
50 kg – 85 kg:	rosa einfach	Rosa Auflage auf die Matratze, Noppen nach oben, darüber das Laken
Indikationen: Alzheimer, Apoplex, Altersschwäche, Arthritis, Arthrose, Aasthmaische Bronchitis, Bandscheibenvorfall, Beinamputierte, Brandver-letzungen, Coxarthrose, Cervicobrachialsyndrom ,Decubitus-Prophylaxe, Decubitus I, II, III, IV, Gicht, Kachexie, Koma, Krebserkrankungen sämtlicher Art (wobei der Patient erfahrungsgemäß auch auf offenen Wunden liegen kann z.B. Metastasen auf dem Rücken offen oder geschlossen) MS (ALS), Morbus Bechterew, Mukoviszidose, Ödem, Osteoporose, Parkinson, Orthopädische OP wie z.B. vor oder nach Hüftgelenkoperation (auch bei fehlendem Hüftgelenk oder OP's, die aufgrund des Alters nicht durchgeführt werden können), Neurodermitis, Patienten mit neurologischen Problemen, Querschnittslähmungen, Rheuma (incl. Weichteilrheuma), Schädel-/Hirn-Verletzte, Schuppenflechte, Schmerzpatienten, Skoliose, Ulcus cruris, Wirbelgleiten, Wirbelbruch, beim Einsatz von Platten am Wirbelkörper der Wirbelsäule, auch zur Verringerung von Krämpfen und Spastiken, u.v.m. <i>Zusätzlich gilt für den Spezial-Schaumstoff -gelb- Einsatz bei Patienten mit :</i> Pergamenthaut, Wassereinlagerungen, Fröhchen, Kinder, CA-Patienten mit starkem Gewichtsverlust, Probleme im Bereich des Wärmehaushaltes des Körpers Schmerzpatienten		
50 kg – 125 kg:	rosa + gelb je einfach	Rosa Auflage mit Noppen nach unten auf die Matratze legen (i.d.R. eine durchgehende Auflage), auf die rosa Auflage wird die gelbe Auflage gelegt, darüber das Laken legen.
Indikationen wie bei 50kg – 85 kg aufgeführt <i>jedoch nur bei Patienten mit nachfolgendenzusätzliche Indikationen</i> Pergamenthaut, Wassereinlagerungen, Fröhchen, Kinder, CA-Patienten mit starkem Gewichtsverlust, Probleme im Bereich des Wärmehaushaltes des Körpers, Schmerzpatienten		
85 kg – 150 kg:	rosa doppelt	Eine rosa Auflage mit Noppen nach unten (durchgehende Auflage) auf die Matratze legen, dreiteilige Auflage mit Noppen nach oben auf die durchgehende Auflage legen, Laken über die Auflagen legen.
Indikationen wie bei 50 kg – bis 85 kg aufgeführt		
125 kg – 200 kg:	2x rosa + 1x gelb	Zwei durchgehende rosa Auflagen mit den Noppen ineinander legen (auf die Matratze) und die gelbe Auflage (3-teilig) auf die rosa Auflage legen, Laken darüber legen.
Indikationen wie bei 50 kg – 125 kg aufgeführt		
150 kg – 220 kg:	rosa dreifach	Zwei durchgehende Auflagen Noppen ineinander legen, 3-teilige rosa Auflage auf die durchgehende Auflage mit Noppen nach oben legen, darüber ein Laken legen.
Indikationen wie bei 50 kg – 85 kg aufgeführt		